



### Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 250 kg.
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.



### Gebrauch

1. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
2. Arretieren Sie den Stuhl!
3. Klappen die Armlehnen bei Bedarf nach hoch.
4. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
5. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.


Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Rollenblockierung



1. Rollenblockierung
2. Entriegeln

### Lenkrolle / Rolle mit Feststellbremse

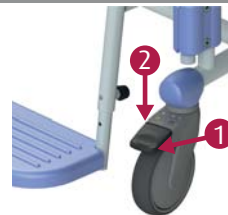

1. Die Richtung der Rolle Blockieren (1x)  
Rollenblockierung (2x)
2. Entriegeln

### Abnehmbaren Sitz

Auf Wunsch kann der Sitz des Tango XL vom Rahmen gelöst werden. Dies ermöglicht eine besonders gründliche Reinigung und es bleiben keine Verunreinigungen zwischen Rahmen und Sitz haften.



### Fußstütze



Beide Fußplatten müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Dazu klappen Sie die Fußplatten hoch oder drehen beide Stützen zur Seite. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

### Armlehne

1. Hochklappen



### Toilettenfunktion

- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Tango XL Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden.
- *Mit Behälterführung:* Der Tango XL Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoff-behälter unter den Stuhl.

### Reinigung und Wartung

Der Tango XL Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständigen Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss ein Stuhl entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

### Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)



### Wichtig!

Diese Instruktionkarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.